

CZ

Možné užívání způsobující poruchu:

- Nepoužívejte nástroj v blízkosti vysoké teploty, prachu nebo zvlhčovače vzduchu.
- Nástroj sami nijak neopravujte, nerozebírejte.
- Nástroj nepoužívejte a nevytahujte napájecí kabel s mokřými rukama.
- Nepoužívejte napájecí kabel, je-li poškozen – poškozený, popraskaný, či jinak znehodnocený obal.
- Pokud jej delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

Při výskytu problémů nebo poruch nechte nástroj opravit. Ponechte to na našem specializovaném operátorovi. Neodborný zásah může nástroj poškodit.

Nástroj je garantován následujícím způsobem:

- 1) V případě potíží s nástrojem nás ihned kontaktujte. Zajišťujeme poprodejní servis do 7 dnů od obdržení formuláře s žádostí. Na baterii YMR-266 je 2 letá záruka od zakoupení. Bezplatné opravy či výměna nástroje jsou možné do 25 dní (600 hodin) od zakoupení.
- 2) Je-li problém jedním z následujících, je nutná oprava zaplatit i v záruční době:
 - problémy způsobené neopatrným zacházením
 - nutná oprava po zásahu/či pokusu o opravu neoprávněnou osobou
 - problémy nebo vzniklá poškození v důsledku ořezů při pohybu
 - problémy s příslušenstvím nebo volbami, které nebyly doporučeny výrobcem
 - problémy způsobené požárem, vodou, solí aj.

OBECNÁ ÚDRŽBA

- Uchovávejte jej vypnutý.
- Povrch otírejte suchým hadříkem.
- Nástroj chráňte před přímým slunečním zářením nebo vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nenechávejte opravy na neoprávněných osobách.

RUTINNÍ KONTROLA

- Před použitím zkontrolujte nástroj a adaptér.
- Používejte-li zařízení, které nebylo dlouho používáno, ujistěte se, že funguje bezpečně.

SK

Možné užívání spôsobujúce poruchu:

- Nepoužívajte nástroj v blízkosti vysoké teploty, prachu alebo zvlhčovače vzduchu.
- Nástroj sami nijako neopravujte, nerozoberajte.
- Nástroj nepoužívajte a nevyťahujte napájací kábel s mokřými rukami.
- Nepoužívajte napájací kábel, ak je poškodený – poškodený, popraskaný, či inak znehodnotený obal.
- Pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.

Pri výskytu problémov alebo porúch nechajte nástroj opraviť. Ponechajte to na našom specializovanom operátorovi. Neodborný zásah môže nástroj poškodiť.

Nástroj je garantovaný nasledujúcim spôsobom:



- 1) V prípade problémov s nástrojom nás ihneď kontaktujte. Zabezpečíme popredajný servis do 7 dní od obdržania formuláre so žiadosťou. Na batériu YMR-266 je 2 ročná záruka od zakúpenia. Bezplatné opravy či výmena nástroja sú možné do 25 dní (600 hodín) od zakúpenia.
- 2) Ak je problém jedným z nasledujúcich, je nutná oprava zaplatiť aj v záručnej dobe:
 - problémy spôsobené neopatrným zaobchádzaním
 - nutná oprava po zásahu / alebo pokus o opravu neoprávnenou osobou
 - problémy alebo vzniknutá poškodenie v dôsledku otrasov pri pohybe
 - problémy s príslušenstvom alebo volbami, ktoré neboli odporúčané výrobcem
 - problémy spôsobené prírodnými katastrofami (požiar, voda, soľ i.)

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

- Ponechávajte nástroj v napájania len do nabitie, potom ho vypojte.
- Povrch utierajte suchou handričkou.
- Nástroj chráňte pred priamym slnečným žiarením alebo vysokou teplotou a vlhkosťou.
- Nenechávajte opravy na neoprávněných osobách.

RUTINNÚ KONTROLU

- Pred použitím skontrolujte nástroj a adaptér.
- Ak používate zariadenie, ktoré nebolo dlho používané, uistite sa, že funguje bezpečne.

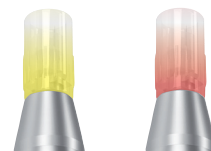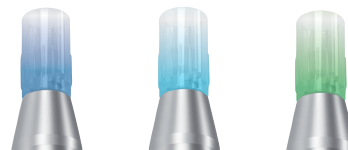

BBmessopen®

LED Photon Electric Derma Pen

OB-DJ 01

SPECIFIKACE

CZ

1. DermaPen – pro aplikaci mikro Jehličkové vibrační terapie.

2. Výkon – nástroj pro aplikaci kosmetických produktů do pokožky pomocí mikro Jehliček, které mění svou vertikální polohu.

3. Klasifikace – typ ochrany proti elektrickému šoku: II. třída vybavení; stupeň ochrany proti elektrickému šoku: plávající aplikovaná část; stupeň ochrany před vstupem vody: běžné vybavení (IPX0); způsob provozu: nepřetržitý provoz.

4. Specifikace

- Název výrobku: LED Photon Electric Derma Pen
- Napájení: dobíjecí
- Název modelu: OB-DJ 01
- Adaptér: 4,2 V–500 MA
- Velikost: 17x2,1 cm
- Váha: 102 g
- Rozměr balení: 18x11x4,8 cm

ŠPECIFIKÁCIA

SK

1. DermaPen – pre aplikáciu mikro Jehličkové vibračné terapie.

2. Výkon – nástroj pre aplikáciu kozmetických produktov do pokožky pomocou mikro Jehličiek, ktoré menia svoju vertikálnu polohu.

3. Klasifikácia – typ ochrany proti elektrickému šoku: II. trieda vybavenia; stupeň ochrany proti elektrickému šoku: plávajúce aplikovaná časť; stupeň ochrany pred vstupom vody: bežné vybavenie (IPX0); spôsob prevádzky: nepretržitú prevádzku.


4. Špecifikácia

- Názov výrobku: LED Photon Electric Derma Pen
- Napájanie: dobíjacia
- Názov modelu: OB-DJ 01
- Adaptér: 4,2 V–500 MA
- Veľkosť: 17x2,1 cm
- Váha: 102 g
- Rozmer balenia: 18x11x4,8 cm



Laserové světlo

(bílá)	fialová	modrá	jasně modrá	zelená	žlutá	červená
Soft light	380–440 nm	430–450 nm	460–495 nm	525–550 nm	565–570 nm	650–730 nm

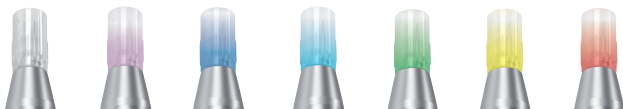

POUŽITÍ

CZ

1. Nastavení – ujistěte se, že jste nabíjeli baterii YMR-266 alespoň 2 hodiny. Pokud je zcela nabitý svítí kontrolka zeleně.

2. Příprava

- 1) Vyjměte jehlovou cartridge ze sterilizovaného obalu.
- 2) Zasuňte pero do kulaté zdířky napájecího boxu a zatlačte jehlu vodorovně až na konec.
- 3) Zajistěte cartridge otočením proti směru hodinových ručiček.
- 4) Nastavení délky jehly se provádí po zapnutí stroje.
- 5) Pokud chcete jehlu odstranit, otočte ji ve směru hodinových ručiček a vodorovně ji vytáhněte.

3. Zapnutí, nastavení rychlosti a délky jehel

- 1) ON/OFF a nastavení rychlosti – stisknutím napájecího tlačítka po dobu 2 sekund pero spustíte a kontrolka se rozsvítí zeleně. Krátkým stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti vybíráte požadovanou rychlost – blikání LED diody v zelené–modré–fialové–červené barvě.
- 2) Nastavení délky jehel – délku vysunutí jehel lze upravovat pomocí otáčením kroužku buď po směru hodinových ručiček – delší délka, nebo proti směru – kratší délka. Různá délka jehel vyžaduje jinou metodu použití.

UPOZORNĚNÍ

PROSÍME, před použitím si přečtěte tyto pokyny a postupujte podle nich. Neaplikujte na osobu:

- 1) trpící akutním onemocněním
- 2) která je alergická či trpí hemofilií
- 3) která má melanózu obličeje
- 4) která má teplotu nebo horečku
- 5) která pravidelně navštěvuje nemocnici
- 6) která bere pravidelné léky
- 7) mladší 12 let

POUŽITIE

SK

1. Nastavenie - uistite sa, že ste nabíjali batériu YMR-266 aspoň 2 hodiny. Ak je celkom nabitý svieti kontrolka na zeleno.

2. Príprava

- 1) Vyberte ihlovou cartridge zo sterilizovaného obalu.
- 2) Zasuňte pero do okrúhle zdierky napájacieho boxu a zatlačte ihlu vodorovne až na koniec.
- 3) Zaisťte cartridge otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- 4) Nastavenie dĺžky ihly sa vykonáva po zapnutí stroja.
- 5) Pokiaľ chcete ihlu odstrániť, otočte ju v smere hodinových ručičiek a vodorovne ju vytiahnite.

3. Zapnutie, nastavenie rýchlosti a dĺžky ihliel

- 1) ON / OFF a nastavenie rýchlosti – stlačením napájacieho tlačidla na 2 sekundy pero spustíte a kontrolka sa rozsvieti na zeleno. Krátkym stlačením tlačidla pre nastavenie rýchlosti vyberáme požadovanú rýchlosť – blikanie LED diody v zelenej–modrej–fialovej–červenej farbe.
- 2) Nastavenie dĺžky ihliel – dĺžku vysunutia ihliel možné upravovať pomocou otáčaním kroužku buď v smere hodinových ručičiek – dlhšia dĺžka, alebo proti smeru – kratšia dĺžka. Rôzne dĺžka ihliel vyžaduje inú metódu použitia.